

⚠ Contacter le service technique

Présence et tranquillisation

Indications sur l'afficheur



Présence infirmière dans la chambre n° 1.



Tranquillisation (coupure du son) en appuyant sur le bouton du pupitre principal.

Appels infirmières

Appels du patient



Appel chambre n°1 depuis le bloc de porte.



Appel depuis chambre n° 1, lit 1. Lit 1



Appel depuis chambre n° 1, lit 2. Lit 2



Appel toilette : en tirant sur la tirette sanitaire de la chambre. WC

Demande d'aide de l'infirmière dans la chambre n° 1



Présence infirmière

Demande d'aide de l'infirmière

OU



Urgence toilette dans la chambre n° 1



Présence infirmière

Demande d'aide

Appel hyper-urgence (code bleu) dans la chambre n° 1



Présence infirmière

Demande d'hyper-urgence


Appel hyper-urgence (code bleu) dans les toilettes de la chambre n° 1



Présence infirmière


Demande d'hyper-urgence

Alarme biomédicale dans la chambre n° 1

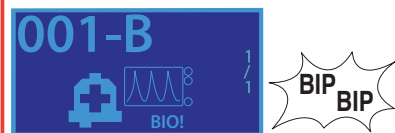


Alarme fugue Porte n° 1



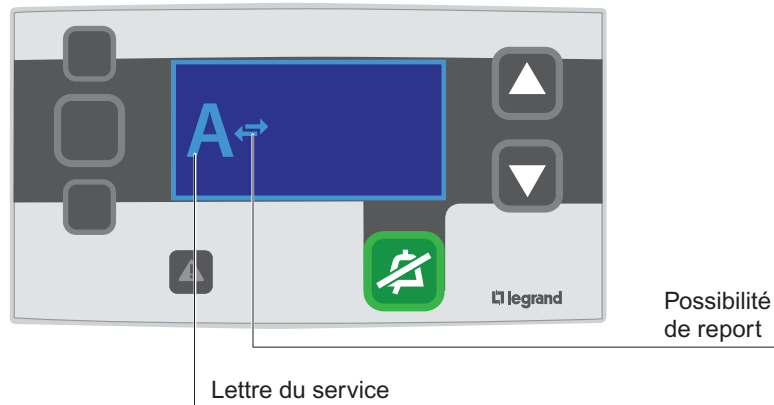

Mémo des services	
Lettre	Nom du service
_____
_____
_____
_____

Appels infirmières	
Activation du report de service (Nouvelle version 15W06)	
Pupitre principal avec report activé 	Appuyer simultanément sur les touches + du pupitre.
Pupitre en configuration du report 	Choisir le service sur lequel le report doit se faire avec la touche
Validation du report 	Valider le report par un appui simultané sur les touches + du pupitre.
Report de la zone A sur B actif 	
Désactivation du report de service (Nouvelle version 15W06)	
Report de la zone A sur B actif 	
Validation du report 	Appuyer simultanément sur les touches + du pupitre.
Pupitre en configuration du report 	Choisir le service "vide" pour annuler le report avec la touche
Pupitre principal avec report activé 	Appuyer simultanément sur les touches + du pupitre.

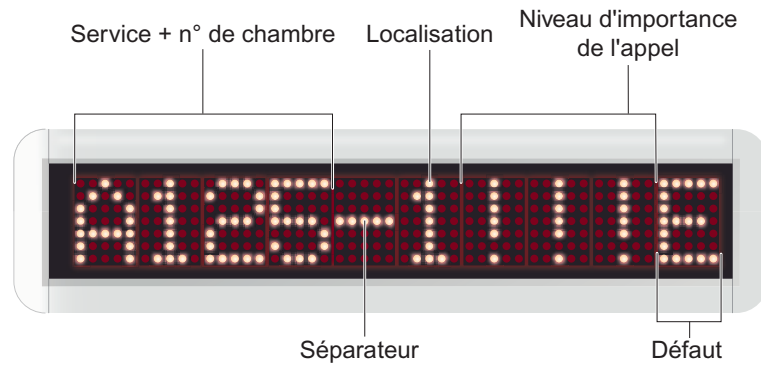

Présence et tranquillisation	
Indications sur l'afficheur	
	Présence infirmière dans la chambre n° 125.
	Tranquillisation (coupure du son) en appuyant sur le bouton du pupitre principal.

Appels infirmières

Appels patient



Appel chambre n°125 depuis le bloc de porte.



Appel depuis chambre n° 125, lit 1.




Appel depuis chambre n° 125, lit 2.



Appel toilette : en tirant sur la tirette sanitaire de la chambre.



Demande d'aide de l'infirmière dans la chambre n° 125

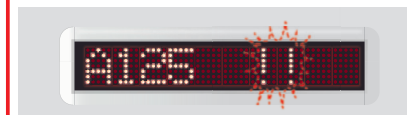


Présence infirmière

Demande d'aide de l'infirmière

OU




Urgence toilette dans la chambre n° 125

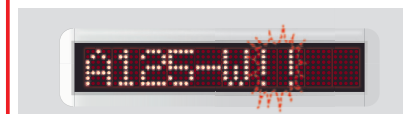

Présence infirmière

Demande d'aide

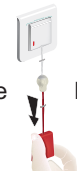

Code bleu dans la chambre n° 125



Présence infirmière

Demande d'hyper-urgence


Alarme biomédicale dans la chambre n° 125



Alarme fugue Porte n° 1



Code bleu dans les toilettes de la chambre n° 125

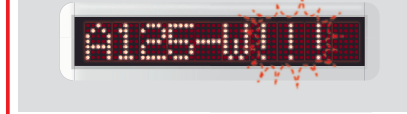

Présence infirmière

Demande d'hyper-urgence


Indications sur l'afficheur	Indications sonores		Types de sonneries	Description
	de l'afficheur	du pupitre principal		
				Appel d'un patient
				Appel toilettes
				Appel d'urgence
				Hyper-urgence


Exemples de messages d'erreur	
	Chambre n° 125 en défaut.
	Présence infirmière dans la chambre n° 125 + défaut système.
	Appel depuis chambre n° 125, lit 1 + défaut système
	Alarme errance sécurisée Porte n° 1 + défaut système







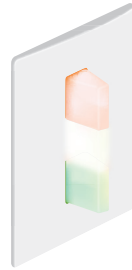

















Service maintenance

Tél. 1

Tél. 2



Présence et tranquillisation	
Indications sur le hublot	
	Présence infirmière dans la chambre qui a émis l'appel.

Appels infirmières	
Appels patient 	Appel chambre n°125 depuis le bloc de porte. 
	Appel depuis chambre n° 125, lit 1.  Lit 1
	Appel toilette : en tirant sur la tirette sanitaire de la chambre.  WC
Alarme biomédicale dans la chambre n° 125  <i>Clignotement lent</i>	Appel depuis chambre ou salle spécifique lors de la fin de cycle d'un appareil médical. 
Alarme fugue Porte n° 1	L'alarme n'est pas reliée aux hublots - Ces derniers ne s'allument pas si l'alarme se déclenche.
Présence et tranquillisation	
Indications sur le hublot	
 <i>Clignotement lent</i>	Demande d'aide de l'infirmière dans la chambre n° 125  Présence infirmière  Demande d'aide de l'infirmière OU 
 <i>Clignotement lent</i>	Urgence toilette dans la chambre n° 125  Présence infirmière Demande d'aide 
 <i>Clignotement rapide</i>	Code bleu dans la chambre n° 125  Présence infirmière  Demande d'hyper-urgence
 <i>Clignotement rapide</i>	Code bleu dans les toilettes de la chambre n° 125  Présence infirmière  Demande d'hyper-urgence
   <i>Allumage cyclique</i>	Défaut de l'installation

		PRIORITY			
TYPE D'APPEL	COMMANDE	AFFICHAGE SUR HUBLOT DE COULOIR	AFFICHAGE SUR PUPITRE ET BLOC DE PORTE À ÉCRAN		
Appel d'hyper-urgence toilettes (code bleu)	+ +	 Clignotement rapide	 BIP BIP BIP		
Appel d'hyper-urgence chambre (code bleu)	OU + +	 Clignotement rapide	 BIP BIP BIP		
Appel d'urgence (aide) toilettes	+ +	 Clignotement lent	 BIP BIP		
Appel d'urgence (aide) chambre	OU + + OU	 Clignotement lent	 BIP BIP		
Alarme fugue		 Clignotement lent	 BIP BIP		
Alarme biomédicale		 Clignotement lent	 BIP BIP		
Appel toilettes			 BIP		
Appel chambre	OU		 BIP		